


## Slik bruker du ECG247 hjertesensor med QR-kode

Følg brukerveiledningen punkt for punkt. **Ikke** lim sensoren på brystet før du får beskjed i ECG247 appen om å gjøre dette. **IKKE** fjern den grønne folien over batteriet på elektrodeplasteret.

1. Last ned ECG247 appen fra App Store eller Google Play på din mobiltelefon. Godta evt. forespørsler om varslinger og Bluetooth tilkobling. ECG247 appen har dette ikonet:



2. Åpne appen og trykk Start
3. Velg «QR-kode». **IKKE** velg «Uten kode»
4. Skann QR-koden på vedlagte ark. Dersom QR-koden ikke er gyldig, må du ta kontakt med din lege/sykehus for å få ny kode. QR-koden har begrenset varighet og kan bare brukes en gang.
5. Angi «Personlig ID» fra vedlagte ark
6. Følg veiledningen i **ECG247 appen** trinn for trinn for å starte EKG testen
7. Bruk sensoren så lenge plasteret henger godt fast. Vi anbefaler minst 3 dagers testperiode.
8. Trykk «Avslutt test» når du er ferdig med testperioden. Ta av ECG247 sensoren og elektrodeplasteret fra brystet.
9. Returner **sensoren** i returkonvolutten. Sensoren skal brukes flere ganger. Batteriet fjernes fra elektrodeplasteret og resirkuleres. Resten av elektrodeplasteret kastes i restavfallet.

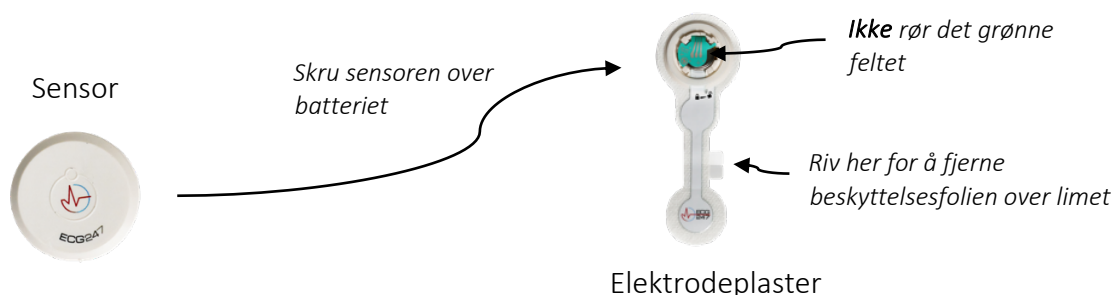


Se komplett brukerveiledning på [www.ecg247.com](http://www.ecg247.com)

Dersom du opplever problemer med Bluetooth-tilkoplingen anbefales at ECG247 appen avinstalleres og at telefonen slås helt av og på igjen før du forsøker på nytt. Sensoren må fjernes fra elektrodeplasteret mens telefonen slås av og på, men plasteret må ikke løsnes fra huden dersom du har limt dette fast. Plasteret kan kun brukes én gang og må ikke flyttes. Sjekk også at Bluetooth og posisjonstilgang/GPS er PÅ for ECG247-appen under Innstillinger -> ECG247.

Batterisparing må være AV i hele testperioden. Ikke bruk «nattmodus». Husk å lade telefonen regelmessig.

Telefonen bør være i samme rom som sensoren i hele testperioden – også om natten. Telefonen vil varsle dersom sensoren er frakoblet, men sensoren vil automatisk koble til telefonen igjen når de er i nærheten av hverandre.

Du kan dusje og trene som normalt, men sensoren tåler ikke bading.

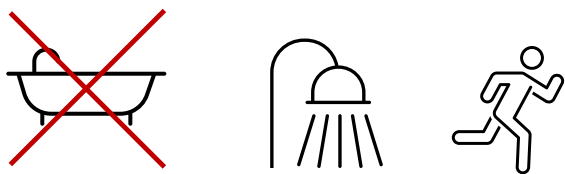

Sjekk at testen går som normalt i ECG247 appen daglig. Start ny test dersom testen har stoppet. Ta kontakt med din lege/sykehus for ny kode.

Testen bør gjennomføres så raskt som mulig.

Ta kontakt med din lege/sykehus om du trenger hjelp.