



Start ECG247-test med QR-kode

1. Logg inn i ECG247 portalen (www.ecg247.com) med e-post, passord og engangspassord fra SMS
2. Velg «Ny pasient»

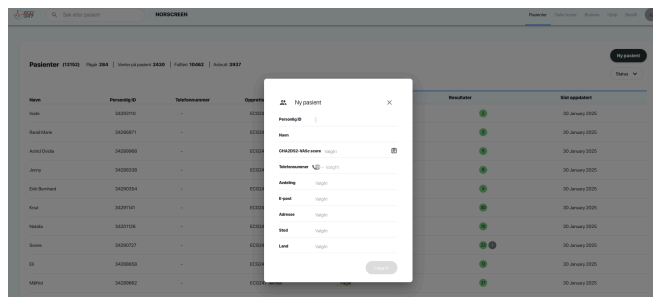


3. Registrer pasienten Personlig ID (personnummer) og navn
4. Velg pasienten og trykk «Start ny test»
5. Angi anbefalt testvarighet, visning av EKG (anbefales) og testresultater (anbefales å slå av) i appen og velg deretter QR-kode som invitasjonstype

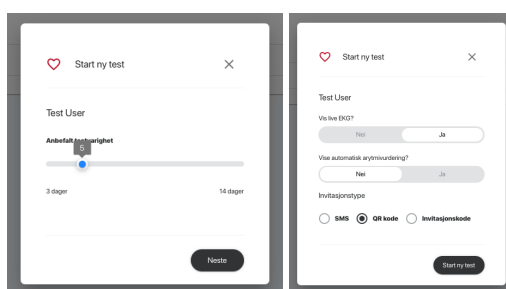

6. Be pasienten laste ned ECG247 appen fra App Store/Google Play



7. Åpne appen, velg QR-kode og skann QR-koden fra skjerm eller utskrift

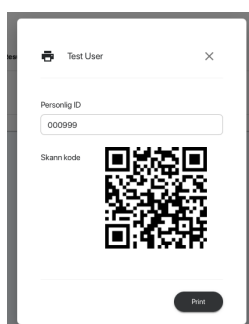

8. Følg instruksjonene i appen for å starte testen