

Informasjon til deg som bruker ECG247

- Vi anbefaler at du har telefonen i nærheten i testperioden. Sensoren kobles vanligvis automatisk til telefonen igjen dersom den har vært utenfor rekkevidde
- Du kan trene og dusje, men ikke bade eller svømme med sensoren.
- Ikke lukk appen helt – ha den åpen i bakgrunnen.
- Sjekk appen minst 2 ganger daglig for å sikre at testen fungerer som normalt.
- Ved å trykke på Symptomknappen i appen eller midt på sensoren lagres et ekstra EKG-opptak
- Slå av batterisparing på telefonen, unngå oppdateringer og lad telefonen hver dag.
- Plasteret kan kun brukes én gang og må ikke flyttes.
- Du kan starte testen på nytt uten å ta av sensoren eller elektrodeplasteret ved å skanne QR-koden eller trykke på SMS-lenken på nytt dersom testen har stoppet for tidlig.
- Bruk sensoren så lenge plasteret henger godt fast. Vi anbefaler minst 3 dagers testperiode.
- Trykk på «Avslutt test» i appen når testperioden er over.
- Sensoren leveres tilbake etter bruk.

Se video om hvordan du bruker ECG247 på www.ecg247.com