


Informasjon til deg som bruker ECG247

Følg brukerveiledningen punkt for punkt. **Ikke** lim sensoren på brystet før du får beskjed i ECG247 appen om å gjøre dette. **IKKE** fjern den grønne folien over batteriet på elektrodeplasteret.

1. Last ned ECG247 appen fra App Store eller Google Play på din mobiltelefon. Godta evt. forespørsler om varslinger og Bluetooth tilkobling. ECG247 appen har dette ikonet:



2. Åpne appen og trykk Start
3. Velg «QR-kode» eller trykk på tilsendt SMS-lenke. **IKKE** velg «Uten kode»
4. Skann QR-koden fra helsepersonell dersom denne invitasjonsmetoden benyttes. QR-koden har begrenset varighet. Dersom QR-koden ikke er gyldig, må du ta kontakt med din lege/sykehus for å få ny kode.
5. Angi «Personlig ID». Dette er vanligvis ditt personnummer.
6. Følg veiledningen i **ECG247-appen** trinn for trinn for å starte EKG-testen.
7. Bruk sensoren så lenge plasteret henger godt fast. Vi anbefaler minst 3 dagers testperiode.
8. Trykk «Avslutt test» når du er ferdig med testperioden. Ta av ECG247-sensoren og elektrodeplasteret fra brystet.
9. Returner **sensoren**. Sensoren brukes flere ganger.
10. Batteriet fjernes fra elektrodeplasteret og resirkuleres. Resten av elektrodeplasteret kastes i restavfallet.

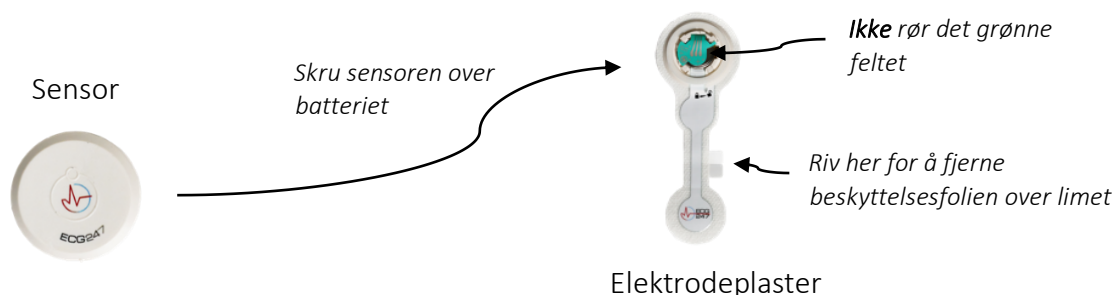

Se komplett brukerveiledning på www.ecg247.com

Dersom du opplever problemer med Bluetooth-tilkoplingen anbefales at ECG247 appen avinstalleres og at telefonen slås helt av og på igjen før du forsøker på nytt. Sensoren må fjernes fra elektrodeplasteret mens telefonen slås av og på, men plasteret må ikke løsnes fra huden dersom du har limt det fast. Plasteret kan kun brukes én gang og må ikke flyttes. Sjekk også at Bluetooth og posisjonstilgang/GPS er PÅ i ECG247-appen under Innstillinger -> Apper -> ECG247.

ECG247-appen må være åpen i «bakgrunnen» på telefonen i testperioden. Batterisparing må være AV. Ikke bruk «nattmodus». Husk å lade telefonen regelmessig. Unngå å oppdatere telefonen i testperioden.

Telefonen bør være i samme rom som sensoren i hele testperioden – også om natten. Telefonen vil varsle dersom sensoren er frakoblet, men sensoren vil automatisk koble til telefonen igjen når de er i nærheten av hverandre.

Du kan dusje og trene som normalt, men sensoren tåler ikke bading.



Sjekk at testen går som normalt i ECG247 appen daglig. Start ny test dersom testen har stoppet ved å skanne QR-koden eller å trykke på SMS-lenken på nytt. Ta kontakt med ditt helsepersonell dersom koden ikke er gyldig.

Ta kontakt med din lege/sykehus om du trenger hjelp.